


ANTEGRADE IR PLATFORM

La surface de travail idéale pour une intervention par voie fémorale antérograde.

L'Antegrade IR Platform consiste en une surface de travail stable, radiotransparente, de hauteur et de longueur adaptées, offrant des avantages cliniques aux usages actuels consistant à poser le matériel de procédure médicale sur le matelas et sur le patient. Il s'agit de la meilleure solution pour la manipulation d'un fil guide ou d'un cathéter guide, grâce à une grande surface parfaitement alignée avec la région de l'artère fémorale pour y déposer le matériel pendant une procédure.

La partie étroite s'étend le long du patient vers l'artère fémorale, offrant au clinicien une plate-forme stable où appuyer ses poignets pendant la manipulation du fil. Les pieds de la table peuvent être ajustés à la hauteur voulue et verrouillés pour la durée de la procédure, garantissant ainsi la stabilité de la surface de travail.

Fabriquée à partir de composite de fibre de carbone et de plastiques industriels à haute performance, l'Antegrade IR Platform est à la fois légère, solide et résistante aux agressions chimiques.

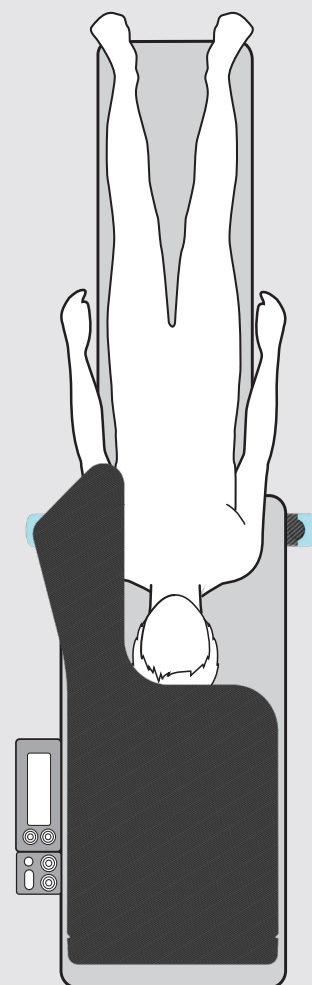

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Surface de travail stable et solide

Alignement le long de la région
fémorale

S'adapte à toutes les tables

Installation et désinstallation
rapides

Positionnement facile

Radiotransparente

Facile à nettoyer


MISE EN PLACE ET POSITIONNEMENT RAPIDES



Serrure de jambe
à la base



UTILISATION DU SUPPORT DE DRAP AVEC L'ANTEGRADE IR PLATFORM

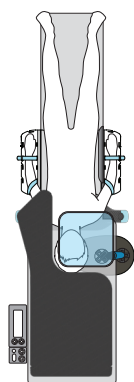

En conjonction avec le support de drap Adept Medical, cette combinaison de produits idéale offre un confort optimal au patient en créant un environnement spacieux sous le drap.


Placer le support de drap dans la partie découpée de la plate-forme au niveau de la tête du patient améliorera le confort de ce dernier et fournira une surface pour empêcher le drap de s'affaisser.

COMPATIBLE AVEC L'ARMURE*

L'Antegrade IR Platform est compatible avec l'ArmSure (AM0600), solution d'immobilisation complète du bras, idéale dans le cas des patients agités.

***ARMSURE (AM0600) ET DRAPE SUPPORT (AM1000) ne sont pas fournis avec l'Antegrade IR Platform.**

SPÉCIFICATIONS

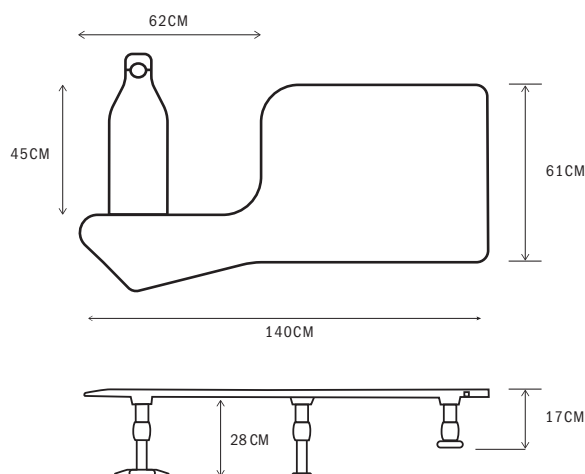

Code produit: Antegrade IR Platform: AM0440
Antegrade IR Platform poids: 4Kg

APPLICATIONS

Radiologie interventionnelle

- Procédures vasculaires par voie fémorale antérograde



EC REP



REPRÉSENTANT CE

Emργο Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Pour en savoir plus, veuillez visiter
www.adeptmedical.com/antegrade-ir-platform