


OVERHEAD ARM SUPPORT

Pour un accès et une imagerie améliorés.

Conçu pour soutenir confortablement les bras du patient en décubitus dorsal, il élimine la flexion extrême de l'épaule, permet un accès à l'abdomen et supprime les artefacts indésirables lors de l'imagerie avec des machines C-Arm ou CT. Cet appareil polyvalent soutiendra l'un ou les deux bras en décubitus dorsal et un seul bras lorsqu'il est utilisé avec la position oblique postérieure.

L'Overhead Arm Support facilite l'utilisation pour l'opérateur, améliore le confort du patient et simplifie les résultats de la procédure et la répétabilité.

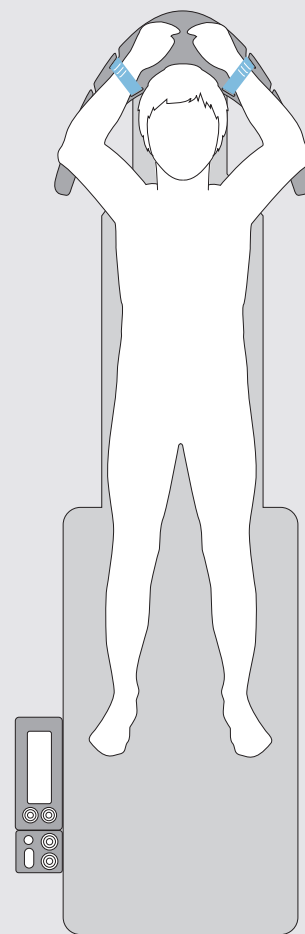

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Permet l'accès à l'abdomen

Supprime les
artefacts indésirables

Mise en place et
installation rapides

Mise en place de sangles
optionnelles pour
plus de sécurité

Confort du patient

S'adapte à toutes les tables

Convient à toutes les
tailles de patients





MISE EN PLACE ET RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

La mise en place, le positionnement, le réglage et le retrait peuvent être effectués à n'importe quel stade de la procédure. Le plateau est placé sous ou au-dessus du matelas et est maintenu en place par le poids du patient. Il est réglable en hauteur et peut être ajusté dans une position optimale à l'aide d'un mécanisme de verrouillage à levier manuel. Les bras du patient sont maintenus fermement; le support convient aux patients sous anesthésie générale ou à ceux qui risquent de s'endormir pendant une procédure.




APPLICATIONS

- Tomographie volumique à faisceau conique
- Cholangiographie transhépatique percutanée
- Cholécystostomie
- Stenting de l'artère iliaque
- Chimioembolisation transartérielle

Destinées être utilisées avec le matériel de laboratoire et d'imagerie existant, les ailes de l'Overhead Arm Support ont été conçues pour s'intégrer dans l'anneau des machines de tomodensitométrie standard et peuvent être utilisées avec n'importe quel centre d'imagerie C-Arm.



SPÉCIFICATIONS

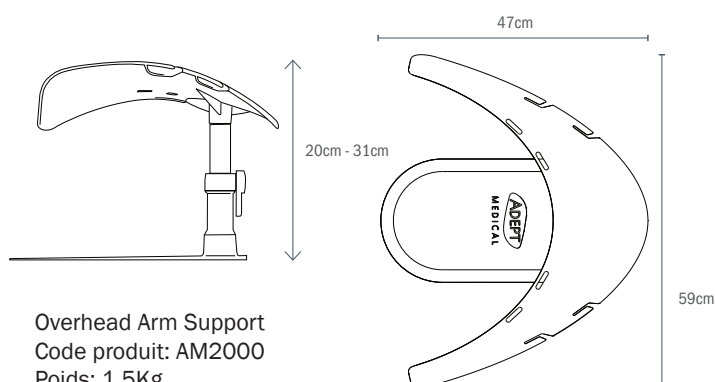

OPTIONS DE CONTENTION ET DE POSITIONNEMENT

Des sangles en polyuréthane souples, malléables et sans latex peuvent être utilisées pour renforcer la sécurité et le confort du patient. Les sangles sont faciles à installer et à ajuster pour contenir sans serrer le bras du patient. Deux emplacements de fixation des sangles pour chaque bras permettent une grande flexibilité lors de l'accès par voie intraveineuse. Les bras du patient sont entièrement soutenus, ce qui réduit le risque de déplacement des bras et améliore le confort et la sécurité du patient.



EC REP

CE

REPRÉSENTANT CE

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



RM dangereuse

Pour de plus amples informations, consultez

www.adeptmedical.com/overheadarmsupport